

ルノス

LUNOS® プロフィーペースト「スーパーソフト」

PMTCPペースト

特性

デュールデンタルのルノスプロフィーペーストスーパーソフトは歯面へのダメージを最小限に抑えた細粒子PMTCPペーストです。インプラントや矯正、補綴物、乳歯などの特にデリケートな歯面にも使用できます。ハイドロキシアパタイトの粒子で、歯肉縁上のバイオフィルムとプラークをやさしく除去します。歯面を滑沢にし艶出しができるので、新たな着色やプラークが付きにくくなります。研磨性指標のRDA値は5以下で歯にやさしく、ハイドロキシアパタイトが再石灰化をサポートします。

成分

ニュートラル

「Neutral」ハイドロキシアパタイト、グリセリン、蒸留水、増粘剤、防腐剤（フェノキシエタノール、PHBエステル）、乳化剤

オレンジ

「Orange」ハイドロキシアパタイト、グリセリン、蒸留水、増粘剤、防腐剤（フェノキシエタノール、PHBエステル）、乳化剤、オレンジ香料（リモネンを含む）、着色料

使用方法

初回使用時は、チューブの開封防止シールを取り外し蓋をします。十分な量のペーストを、ルノス®プロフィーリングもしくはダッペングラスに出します。患者さんの歯面状況に合わせた適切な研磨器具を選定し、研磨を行います。歯面のオーバーヒート避けるため、常に研磨器具と歯面の間に十分なペーストが1層あることを目視確認しながら施術を行ってください。また、回転器具や研磨器具などの医療機器は、製造元が推奨する最大回転速度を超えないように使用説明書を遵守し使用してください。

LUNOS® Prophy Paste 「Super Soft」



特徴

- 歯面へのダメージを最小限に抑えた細粒子ペースト
- 歯科医院でのクリーニング全般に使用できます
- インプラントや矯正、補綴物、乳歯などデリケートな歯面にも使用可能
- 研磨性指標のRDA値5以下で限りなく歯にやさしい
- ハイドロキシアパタイト含有で再石灰化をサポート
- 片手で操作可能なフリップトップ
- 歯面上のペースト量を目視確認可能にするペーストカラー
- 2つのフレーバー（オレンジ、ニュートラル）
- 動物性由来成分、グルテン、ラクトース、フルクトース、マイクロプラスチック非含有

適用症例

- 正常な嚥下が可能な小児および大人向け
- 歯肉縁上のバイオフィルムとプラークの除去
- 乳歯やインプラントの歯面清掃および研磨
- フッ化物塗布やホワイトニング前のクリーニングや、補綴物セット前の歯面準備
- 矯正ブラケット装着前の歯面クリーニングや、レジン充填前の歯面研磨に使用可能

廃棄方法

内容物／容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。

物理的データ

ペーストの外観

ニュートラル
「Neutral」白色

オレンジ
「Orange」オレンジ色

容量

50g

使用期限

以下の保管条件の場合、
未開封 製造から36か月
開封後 開封から12か月

保管

乾燥を防ぐため、ペーストを取り出した後はすぐにチューブの蓋をしっかりと閉めてください。0°C～25°Cの、湿気や明るい光の当たらない風通しのいい場所で保管してください。直射日光に当てないこと。

一般注意事項

Lunos®スーパーソフトは医療機器です。この製品は、歯科医院でのプロフェッショナルケアの用途でのみ使用することが可能です。施術の際は、施術者と患者共にゴーグルなどの適切なPPE（個人保護具）を使用してください。動物性由来成分、グルテン、ラクトース、フルクトース、マイクロプラスチックは非含有。ペーストの成分（リモネン等）にアレルギーのある患者さんへは「ニュートラル」をご使用ください。ユニットにペーストが飛散した場合は、湿った布で清掃してください。

安全上の注意事項

飲み込まないこと。目に入らないように注意し、万が一目に入った場合は水で十分に洗い流してください。