

## LUNOS® PROPHY POWDER PERIO COMBI

ルノスプロフィーパウダー ペリオコンビ  
PMTcパウダー

## 特性

デュールデンタルのルノス®プロフィーパウダー「ペリオコンビ」は、歯肉縁下・縁上の歯面清掃に使用します。革新的な研磨粒子「トレハロース」でやさしく効果的にバイオフィルムが除去でき、リコールの施術に最適です。粒子サイズ約30 $\mu$ m。水溶性が高く、歯周ポケットに残留しません。患者さんの口腔内にパウダーが残らないため口腔粘膜の乾燥および不快感もフリー。また、デンタルユニットや配管内に残らないため、ユニットの機能を損ないません。わずかな甘味度を持つ「トレハロース」は、口腔内で糖代謝されない非う蝕性の糖パウダーです。

## 成分

トレハロース、添加剤

## 使用方法

使用前にボトルを振ってください。初回使用時は容器の蓋を外し、開封防止シールを取り外し蓋を戻します。パウダーをコンテナに充填する前に、必ずコンテナ内部が完全に乾燥している事を確認し、コンテナの最大充填量を超えないように注意しながら充填します。充填時に発生する粉塵を最小限に抑えるため、容器の注ぎ口を使用してボトルを軽く抑えながら充填してください。敏感な皮膚を保護するため、治療開始前に患者の唇にワセリンを塗布してください。治療終了後、湿らせた使い捨ての布(例:Lunos® Prophy Wellness Cloth)で患者の顔をきれいにしてください。



## 特徴

- 革新的な研磨粒子「トレハロース」
- 粒子サイズ約30 $\mu$ m
- わずかな甘味度(砂糖の約45%)
- 口腔内で代謝されないため非う蝕性
- 水溶性が高く、歯周ポケットに残留しません
- 口腔粘膜の乾燥と不快感フリー
- デンタルユニットや配管内に残らないため、機能を損ないません
- 片手で操作可能なフリップトップ
- 無香料、無着色でアレルギーフリー
- 動物性由来成分、グルテン、乳糖、果糖非含有

弊社では社内外における綿密な科学的研究に基づき、最新情報に従って薬品類に対する推奨を行っています。これに関する責任範囲が記された「一般販売および納品における免責条項」をお求めの場合は、弊社までご連絡ください。

## 適用例

- 歯肉縁下ノズル（デュールデンタルのペリオチップなど）を用いた歯周バイオフィルムの除去
- 初期治療終了後の粘膜炎やインプラント周囲炎の治療をサポートするためのインプラント表面のクリーニング
- 歯肉溝や特に敏感な歯面のプラークの除去
- 歯肉縁上の少量のステイン除去
- 矯正装置周囲のプラーク除去
- 小児から成人まで使用可能

## 使用上の注意

パウダージェット装置が補綴物や充填物に直接当たらないように注意してください。治療中にスプレーノズルを歯肉に向けしないでください。軟組織に直接噴射すると、歯肉を損傷することがあります。組織内に気腫が発生したり、血液中に空気が入って塞栓症を起こしたりするおそれがあるため、パウダージェットノズルを歯肉ポケットに直接当てないでください。治療終了後2〜3時間以内に食べ物や飲み物（お茶、コーヒーなど）を摂取すると、再び歯が変色することがあります。

## 禁忌

慢性気道疾患（気管支炎や喘息など）の患者は、エアロソルに含まれる粉体が呼吸困難を引き起こす可能性があるため、パウダーを使用した歯面清掃機を使用した治療をしないでください。また、本製品は、エナメル質損傷部、エナメル質形成不全、ホワイトスポットには使用しないでください。深い歯周ポケットの治療では、菌血症になる可能性があります。したがって、リスク患者（心内膜炎、妊娠・授乳婦、感染症、免疫不全（好中球減少、無顆粒球症、糖尿病、血友病）、治療中の患者（放射線療法、化学療法、抗生物質療法））に対しては、適切な対策や制限を行う必要があります。

## 廃棄方法

内容物／容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。

## 物理的データ

### パウダーの外観

白色

## 容量

100g

## 使用期限

以下の保管条件の場合、  
**未開封** 製造から36か月  
**開封後** 開封から12か月

## 保管

**温度** 0〜25℃

**湿度** 10〜75%

湿気の吸収を防ぐため、パウダーを使用後はすぐに容器の蓋をしっかりと閉めてください。湿気や明るい光の当たらない風通しのいい場所で保管してください。直射日光に当てないこと。

## 一般注意事項

ルノス®プロフィーパウダー「ペリオコンビ」は医療機器です。この製品は、歯科医院でのプロフェッショナルケアの用途でのみ使用することが可能です。ご使用前に、歯面清掃機の操作方法を確認してください。施術の際は、施術者と患者共にゴーグルなどの適切なPPE（個人保護具）を使用してください。スプレーミストが発生するため、施術中は適切な吸引装置を用いて吸引を行うこと。「デュールデンタルカニューレ」の使用を推奨します。動物性由来成分、グルテン、乳糖、果糖非含有。施術後ユニットに飛散したパウダーは、濡った布で清掃してください。

## 安全上の注意事項

飲み込まないこと。目に入らないように注意し、万が一目に入った場合は水で十分に洗い流してください。