



www.duerr.co.jp



対象物	作業手順	プランニング
<b>器具</b> ミラーやスケーラーなどの器具、回転器具の洗浄除菌	<b>ID213 instrument disinfection</b> <b>インスツルメント</b> 器具の除菌 器具の使用後：ハイゴボックスで浸漬除菌／超音波洗浄器使用⇒すすぎ⇒目視確認⇒乾燥⇒滅菌⇒保管 ノロウイルスには50倍希釈で30分間	50倍希釈 水1ℓに1杯 浸漬 5分 超音波 2分
<b>回転器具</b> 鋼鉄やステンレス製のバー、リーマーなどの回転器具の除菌	<b>ID220 rotary instrument disinfection</b> <b>バー／リーマー</b> 回転器具の除菌 バーやリーマーの使用後：浸漬除菌／超音波洗浄器使用⇒すすぎ⇒目視確認⇒乾燥⇒滅菌⇒保管 注意：アルミ、真鍮製などには「ID213 インスツルメント」を使用	原液使用 浸漬 1分 超音波 30秒
<b>表面</b> 材質に配慮すべき箇所：ユニットチェア、ライトのハンドル、または合成皮革やアクリルガラスなど敏感な表面の除菌	<b>FD366 sensitive quick-acting surface disinfection</b> <b>センシティブ</b> 表面のクイックの除菌 汚染された所を原液で湿らせた状態にする⇒1分放置⇒乾燥	原液使用 作用 1分
<b>表面</b> 短時間で除菌すべき箇所：ユニットテーブル、ハンドピース、イメージングプレートの保護カバーなどの除菌	<b>FD350 disinfection wipes</b> <b>除菌ワイプ</b> 表面の除菌 汚染された所を湿らせた状態にする⇒1分放置⇒乾燥 注意：アルコールに弱い材質には「FD366センシティブ」を使用	作用 1分
<b>チェアレザー</b> ユニットチェアの合成皮革（レザー）の清掃と保護	<b>FD360 cleaning and care of vinyl upholstery</b> <b>レザーケア</b> 合成皮革清掃保護 レザーにスプレーし、直ちに布で拭き取る、汚れがひどい場合は専用スポンジでこすり取る、残った液は乾いた布で拭き取る	原液使用
<b>広い表面</b> 床、キャビネット、デンタルチェア、機器や備品等などの広範囲の除菌洗浄	<b>FD312 surface disinfection</b> <b>エコ</b> 表面の除菌 汚染された所を希釈液で湿らせた状態にする⇒15分放置⇒乾燥	100倍希釈 水2ℓに1杯 作用 15分
<b>吸引システム</b> ユニットチェアの吸引システム、セパレーター分離器、スピットン排水のメンテナンス、洗浄除菌、消臭	<b>BIOCLEAN® disinfection of suction system</b> <b>バイオクリーン</b> 吸引システムの除菌 毎日1〜2回、診療終了後と昼休み前に使用 パキュームと排唾管でユニット毎に1ℓを吸引⇒スピットンには約4ℓを流す（より高い洗浄効果を得るには先に2ℓの水を吸引／流す） <b>MD555 cleaner special cleaner for suction system</b> <b>フロークリーナー</b> 吸引システム強力洗浄 週1〜2回、昼休み中の1〜2時間放置して1〜2ℓの水を吸引／流す パキュームと排唾管でユニット毎に1ℓを吸引⇒スピットンには約4ℓを流す（注意：作用後必ず1〜2ℓの水を吸引／流す）	<b>毎日の除菌洗浄</b> 50倍希釈 水1ℓに1杯 作用 60分 <b>固着解消 徹底洗浄</b> 20倍希釈 水1ℓに2.5杯 作用 30〜120分
<b>スピットン</b> 水垢、血液、歯垢染色剤や型取り剤などの洗浄	<b>MD550 spittoon bowl cleaner</b> <b>スピットンクリーナー</b> 原液をスピットンに噴きつけ、スポンジやブラシで全体に塗布してから約2〜3分放置して水で流す	原液使用
<b>印象体・技工物</b> 印象体や補綴物などの対象物すべての除菌洗浄	<b>MD520 impression disinfection</b> <b>インプレッション</b> 印象体・技工物の除菌 印象体を技工士に渡す前に除菌、または対象物で作業する前に除菌 ハイゴボックス、インポウルなどの浸漬除菌：シンクなどで対象物を下洗い⇒5分間浸漬⇒よくすすいで乾燥 ハイゴジェット使用：対象物を機器内で水とエアで洗う⇒「MD520インプレッション」の噴射⇒10分間置く⇒水ですすぐ⇒エアで乾燥	原液使用 浸漬 5分 ハイゴジェット 作用 10分

日	Sunday Sonntag Dimanche	月	Monday Montag Lundi	火	Tuesday Dienstag Mardi	水	Wednesday Mittwoch Mercredi	木	Thursday Donnerstag Jeudi	金	Friday Freitag Vendredi	土	Saturday Samstag Samedi