



DÜRR
DENTAL

FD 312

エコ

表面の洗浄除菌

Surface disinfection

ドイツ
欧州規格
認定品

+

1本で
250L分の
希釈液

濃縮液


2.5L



FD312 エコ

表面の洗浄除菌

床、キャビネット、デンタルチェア、機器や備品等の表面の拭き掃除と除菌に使用します。

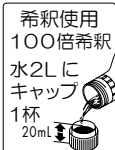

【使用方法】 ●適切な容器やバケツで希釈液を作ります。水2Lに緑色のボトルキャップの内線(20mL)まで原液を入れると100倍希釈液ができます。ぬるま湯を使うとさらに除菌効果が高まります。●希釈液を布に含ませて拭き取ります。汚れがひどい場合は希釈液を2つの容器に分けて下拭きと本拭きをしてください。作用時間は15分、高濃度(水1Lにキャップ1杯=50倍希釈)の場合は5分です。

【取扱注意】 ●使用前にラベルをよく読むこと。●保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。●皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。●皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。●希釈濃度と推奨作用時間を守ること。●他の洗浄液や石鹸と混ぜないこと。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●濃縮液を排水に流さないこと。容器はすすいで処分すること。内容物／容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。◎使用期限は側面に記載(年/月)

危険

成分:アルキル(C=12~18)(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム=クロリド CAS 番号 68391-01-5



重篤な眼の損傷
皮膚刺激



水生生物に非常に強い毒性
長期継続的影響によって水生生物に毒性

デュール デンタル
DÜRR DENTAL (ドイツ)
produced by orochemie GmbH & Co KG

www.duerr.co.jp/fd312

