

FD350 除菌ワイブ

ユニットテーブル、ライトのハンドル、ハンドピース、イメージングプレートの保護カバーなどアルコール耐性のある表面に使用できます。汚れをしっかりと落とし、乾燥後も拭き跡が残りません。心地よい香りの除菌ワイブです。

【使用方法】●最初に使用する前に蓋部分を外し、ワイブ入りの袋の上部を切って開け、中心からワイブを少し取り出して蓋の穴にペンなどを使って通過させてください。



●使用する際は蓋を開けてワイブを1枚分引き出し、切れ目のところで横に引いて取り出してください。●対象の表面を拭き1分以上放置してください。●乾燥を防ぐためワイブを取り出した後は、すぐに蓋を閉めて密閉してください。●アクリルガラス等のアルコールに弱い材質には使用しないでください。

ワイブの袋の表下部に使用期限(年/月)と種類が記載されています。



FD 350

除菌ワイブ

表面の除菌

Disinfection wipes

ドイツ
欧州規格
認定品



ワイブ
110枚

【取扱注意】●使用前にラベルをよく読むこと。●熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。●保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●内容物/容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。



www.duerr.co.jp/
fd350

デュール デンタル
DÜRR DENTAL (ドイツ)
produced by orochemie GmbH & Co KG



E.350.01.05.09.2022.04



FD 350

除菌ワイブ

表面の除菌

Disinfection wipes

ドイツ
欧州規格
認定品



ワイブ
110枚