



FD 360

レザーケア

合成皮革清掃保護

Cleaning and care of vinyl upholstery

アボカドオイル
とシリコンによる
保護効果

+

汚れがひどい
時に使える専用
スポンジ付
クロス付



500 mL

FD360 レザーケア

合成皮革清掃保護

ユニットチェアなどの合成皮革（レザー）の清浄と保護の専用クリーナーです。アボカドオイルとシリコンの効果で表面が保護され光沢が出ます。

【使用方法】 ●原液を清掃する箇所にスプレーし直ちにクロス（布）で拭き取ります。シミや変色など、汚れがひどい場合は付属の専用スポンジでこすり取ってください。表面に残った液は付属のクロス（布）で拭き取ってください。●1日1回、診療終了時に使用してください。「FD366 センシティブ」等で表面を洗浄除菌後に使用することを推奨します。

【取扱注意】 ●本革には専用スポンジを使用せず、クロス（布）を使用すること。使用前に目立たない箇所に塗布して試すこと。●使用時は保護手袋を着用すること。●誤って眼に入った場合は直ちに水洗し専門医の処置を受けること。●使用後は密閉して小児の手の届かない冷暗所に保管すること。

[www.duerr.co.jp/
fd360](http://www.duerr.co.jp/fd360)

デュール デンタル

DÜRR DENTAL (ドイツ)

produced by orochemie GmbH & Co KG

