



DÜRR
DENTAL

FD366 sensitive

センシティブ

表面のクイック除菌

Quick-acting surface disinfection

ドイツ
欧州規格
認定品



原液使用
2.5L

FD366 センシティブ

表面のクイック除菌

原液
使用

ユニットチェアのテーブル、ライトのハンドルまたは樹脂や合成皮革などの表面の洗浄除菌に使用します。アルコール含有量が少ないため材質にやさしくアクリルガラスなどにも使用できます。

【使用方法】 ●原液を布に含ませて表面を湿らせた状態にします。そのまま1分以上放置し乾燥させます。●手の届かない隙間には直接スプレーします。●目に見える汚れには拭き取りを繰り返して汚れを取り除き、1分以上放置してください。●チェアの合成皮革は、「FD366 センシティブ」で洗浄除菌を行って、その後「FD360 レザーケア」で表面のケアを行います。

【取扱注意】 ●使用前にラベルをよく読むこと。●使用の際は換気を行うこと。●裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。●保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。●飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●他の洗浄液や石鹸と混ぜないこと。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●原液を排水に流さないこと。容器はすすいで処分すること。内容物／容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。◎使用期限は側面に記載（年／月）

警告

成分：1-プロパノール CAS 番号 71-23-8



引火性液体及び蒸気



強い眼刺激
眠気又はめまいのおそれ

デュール デンタル
DÜRR DENTAL (ドイツ)
produced by orochemie GmbH & Co KG

www.duerr.co.jp/fd366

