



**FD 366** sensitive top wipes

センシティブワイプ

表面のクイック除菌

Disinfection of sensitive surfaces



洗浄+除菌  
Power

# FD366

ドイツ欧州  
規格認定品

## センシティブワイプ

### 表面のクイック除菌

ユニットチェアのテーブル、ライトのハンドルまたは樹脂や合成皮革などの表面の洗浄除菌に使用します。アルコール含有量が少ないため材質にやさしくアクリルガラスなどにも使用できます。



**【使用方法】** ●使用する際は蓋を開けてワイプを1枚取り出してください。●対象の表面を拭き1分以上放置してください。●乾燥を防ぐためワイプを取り出した後は、蓋を閉めて密閉してください。●目に見える汚れには拭き取りを繰り返して汚れを取り除き1分以上放置してください。●チェアの合成皮革は、「FD366 センシティブ」で洗浄除菌を行って、その後「FD360 レザーケア」で表面のケアを行います。

**【取扱注意】** ●使用前にラベルをよく読むこと。●保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●内容物／容器は都道府県又は市町村の規則に従い廃棄すること。

**警告**  
成分：1-プロパノール  
CAS 番号 71-23-8



強い眼刺激

  使用期限は側面に記載、開封後1か月以内に使い切ってください。

ワイプ  
50枚

[www.duerr.co.jp/  
fd366w](http://www.duerr.co.jp/fd366w)

デュール デンタル

DÜRR DENTAL (ドイツ)

produced by orochemie GmbH & Co KG

