

マルチワイブ 不織布クロス

このワイブはデュールデンタルハイジーンのFDシリーズ(FD366など)の表面用洗浄除菌液を入れて使用します。吸水性に優れたワイブで、院内の家具や床、ユニットの表面をくまなく洗浄除菌できます。細かいほこりや髪の毛などをしっかりとキャッチ、院内がきれいに保てます。お使いの床ワイパーに使用することができます。

詰めかえワイブ：リフィルロール60枚入
(CEF358K0809/DF-DRFDMWR)

【使用方法】●作用時間は各洗浄除菌液ボトル裏面の説明書をご参照ください。●対象の表面が洗浄除菌液で濡れた状態になるように拭いてください。●洗浄除菌液を入れたマルチワイブは3か月以内に使い切ってください。●ワイブを使い切った後リフィルを入れる前に、こちらのケースの洗浄と除菌を行ってください。温水(55°C以下)で洗浄と乾燥をさせます。その後表面用洗浄除菌液を少量注ぎ清潔な布などで内側全体を清拭してください。●洗浄除菌液の交換にはフタの上のラベルの修正または貼り変えて記載してください。

ご使用の洗浄除菌液のボトルの警告記号に注意してください。



www.duerr.co.jp/
hygiene

デュール デンタル
DÜRR DENTAL (ドイツ)
produced by orochemie GmbH & Co KG




FD multi wipes

マルチワイブ

不織布クロス

Non-woven cloth

ワイブ
60枚

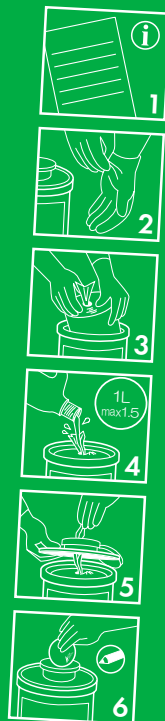

【ご使用の前に】

1 説明書を確認

このマルチワイブに使用出来るのはデュールデンタルのFDシリーズ(FD366など)の洗浄除菌液です。ボトル裏面の説明書の指示に従ってご使用ください。

2 個人防護具 (PPE)

作業を行う際は保護手袋、保護眼鏡または保護面を着用してください。

3 ワイブロールをセット

ワイブロールをビニールから出して下さい。ワイブを取りやすくするために、ロールの形を丸く整え、ロールの中央から出ている1枚のワイブが上になるようにセットします。

4 洗浄除菌液を注ぐ

全てのワイブに行きわたるように円を描きながら1L流し入れます(最大1.5L)。

5 ワイブの使用準備

ワイブの先端をフタに通します。

6 ラベルの記載

ご使用になる方が分かるようにフタの上部のラベルシールに洗浄除菌液の種類、作成者、作成日、洗浄除菌液のLOT番号と使用期限を記載します。ご使用になる場合はフタのラベルシールを確認してからご使用ください。

◎全体に洗浄除菌液が行きわたるまで30～60分待ちます。