



DÜRR  
DENTAL

# ID 213

## インスツルメント 器具の洗浄除菌

Instrument disinfection

ドイツ  
欧州規格  
認定品

+

1本で  
125L分の  
希釈液

濃縮液

# 2.5L



# ID213 インstrument 器具の洗浄除菌

ミラーやスケーラーや手術用インスツルメントなどの洗浄除菌に使用します。

**【使用方法】** ●専用容器「ハイゴボックス」などで希釈液を作ります。水 1L 毎に青色のボトルキャップの内線まで (20mL) の原液を入れると 50倍希釈液ができます。●使用後の器具は、すぐ全体を完全に希釈液に浸し 5分間置いてください。超音波洗浄器の場合は2分間、汚れがひどい場合は 30~60分浸漬してください。●希釈液は最長2週間使用できます。汚れの度合いによって週2~3回液を交換してください。●アルミニウム製と他の金属製器具を同じ容器で浸漬すると電位差反応により変色する可能性がありますので別々の容器をご使用ください。

**【取扱注意】** ●使用前にラベルをよく読むこと。●ミスト/スプレーを吸入しないこと。●気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。●眼、皮膚、衣類につけないこと。●保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。●皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。●希釈濃度と推奨作用時間を守ること。●他の洗浄液や石鹸と混ぜないこと。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●濃縮液を排水に流さないこと。容器はすすいで処分すること。内容物/容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。環境への放出を避けること。◎使用期限は側面に記載 (年/月)

希釈使用  
50倍希釈

水1Lに  
キャップ  
1杯  
20mL



## 危険

成分：3-アミノプロピル-Dデシルプロパンジアミン CAS 番号 2372-82-9、塩化アルキルベンジルジメチルアンモニウム CAS 番号 68424-85-1、脂肪族アルコールポリグリコールエーテル CAS 番号 97043-91-9



長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ



重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷



長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性



飲み込むと有害

デュール デンタル  
DÜRR DENTAL (ドイツ)  
produced by orochemie GmbH & Co KG

[www.duerr.co.jp/  
id213](http://www.duerr.co.jp/id213)

