



DÜRR  
DENTAL


# ID 220

## バー/リーマー

### 回転器具の洗浄除菌

Rotary instrument disinfection

ドイツ  
欧州規格  
認定品

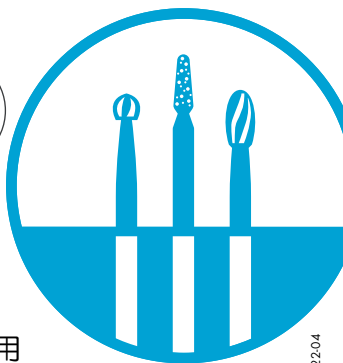

原液使用  
**2.5L**

# ID220 バー/リーマー

## 回転器具の洗浄除菌

原液  
使用

ステンレスやスチール製のバーやリーマーに付着したタンパク質除去に適した洗浄除菌液です。

**【使用方法】** ●使用後の回転器具は、すぐ原液に完全に浸し1分間置いてください。超音波洗浄器で使用する場合は30秒間です。●汚れがひどい場合は30分～60分浸漬してください。●作用時間が終わったら流水でしっかりとすすぎ、乾燥させます。必要に応じて滅菌してください。●本液は最長1週間使用できます。汚れの度合いによって週2～3回液を交換してください。●注意：アルコールとアルカリに弱い材質や非鉄金属（アルミ、真鍮など）、合成樹脂には使用できません。これらには「ID212/213インスツルメント」をお使いください。カーバイドバーや根管治療用器具は使用前にテストを行ってください。

**【取扱注意】** ●使用前にラベルをよく読むこと。●眼、皮膚、衣類につけないこと。●保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。●皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。●他の洗浄液や石鹼と混ぜないこと。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●原液を排水に流さないこと。容器はすすいで処分すること。内容物／容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。◎使用期限は側面に記載（年／月）

### 危険

成分：1-フロパノールCAS番号71-23-8、水酸化カリウムCAS番号1310-58-3



引火性液体  
及び蒸気



重篤な眼の  
損傷  
皮膚刺激

デュール デンタル  
DÜRR DENTAL (ドイツ)  
produced by orochemie GmbH & Co KG

[www.duerr.co.jp/  
id220](http://www.duerr.co.jp/id220)

