



DÜRR
DENTAL

MD 520

インプレッション

印象体／技工物の除菌

Impression disinfection

ドイツ
欧州規格
認定品



原液使用

2.5L

MD520 インプレッション

印象体／技工物の除菌

原液
使用

各種印象体、補綴物、石膏模型の洗浄除菌液です。アルジネート、シリコン、ポリエチレングム、寒天、ポリエーテルラバー、ポリサルファイド、その他ワックス類にも使用可能です。印象体などはトレーと一緒に洗浄除菌できます。

【使用方法】 ●原液で使します。●浸漬洗浄除菌の場合：専用の容器（除菌缶またはハイゴボックス）に原液を入れます。印象体、補綴物などを流水で予備洗浄してから5分間浸漬します。その後よくすすいで乾燥させます。使用した液は1週間または印象体 50 個（ハイゴボックス）、20 個（除菌缶）まで使用できますが汚れの状態に応じて交換してください。●印象体洗浄除菌システム「ハイゴジェット」の場合：ボトルの蓋を外しバルブをつけて本体に装着します。印象体や補綴物を庫内に入れて両面それぞれに5秒ずつ水をスプレーして予備洗浄します。「MD520 インプレッション」を全体にスプレーします。10分間放置した後、両面5秒ずつ水洗してエアで乾燥させます。（ハイゴジェットの取扱説明書をご確認ください。）

【取扱注意】 ●使用前にラベルをよく読むこと。●保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。●皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。●希釈濃度と推奨作用時間を守ること。●他の洗浄液や石鹼と混ぜないこと。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●原液を排水に流さないこと。容器はすすいで処分すること。使用済みの液／容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。


◎使用期限は側面に記載（年／月）

デュール デンタル
DÜRR DENTAL (ドイツ)
produced by orochemie GmbH & Co KG

警告

成分：グルタラル CAS 番号 111-30-8、
プロバン-2-オール CAS 番号 67-63-0

皮膚刺激
アレルギー性
皮膚反応を起
こすおそれ
強い眼刺激
呼吸器への刺
激のおそれ
長期継続的影
響によって水
生生物に有害



www.duerr.co.jp/
md520

