



バイオクリーン

BIOCLEAN®

吸引システムの洗浄除菌

Disinfection of suction system

濃縮液

1 L



バイオクリーン

BIOCLEAN®

吸引システムの洗浄除菌

デンタルチェアの吸引システムやスピットンの排水管及び分離器の除菌、脱臭、洗浄とメンテナンスが同時にできます。無泡性でアルデヒド、フェノール、塩素は非含有の洗浄除菌液です。

【使用方法】 ●毎日1~2回、診療終了後や昼休み前に使用してください。●専用容器「オロカップ」で希釈液を作ります。水1L毎に黄色のボトルキャップの内線(20mL)まで原液を入れると50倍希釈液ができます。●バキュームや排唾管はユニット毎に1Lの希釈液を吸引させます。より高い洗浄効果を得るには作業前に2Lの水を吸引させてください。スピットンの洗浄除菌には希釈液を約 $\frac{1}{2}$ L 流し込んでください。●希釈液使用后60分以上放置、または次の診療まで水洗しないてください。

【使用上の注意】

●使用前にラベルをよく読むこと。●保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。●皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。●希釈濃度と推奨作用時間を守ること。●他の洗浄液や石鹼と混ぜないこと。●「MD555 フロークリーナー」を使用した場合、4時間以上あけてご使用ください。●床などにこぼした際は拭き取ってください。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●濃縮液を排水に流さないこと。容器はすすいで処分すること。内容物/容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。

デュール デンタル

DÜRR DENTAL (ドイツ)

produced by orochemie GmbH & Co KG

発売元: 株式会社ヨシダ

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

希釈使用
50倍希釈

水1Lに
キャップ
1杯
20mL



危険

成分: シオクチルジメチルアミニウム・クロリド CAS 番号 5538-94-3、水酸化カリウム CAS 番号 1310-58-3、プロパン-2-オール CAS 番号 67-63-0



金属腐食のおそれ

重篤な皮膚の薬傷及び
眼の損傷

長期継続的影響によって
水生生物に有害

www.duerr.co.jp/
bioclean

