




ユニット内部のメンテナンス

血液や歯科材料、切削片などでユニット内部は汚染されます。この汚れは、バキュームハンドピース、ホース、分離器および排水管の機能を損なうため、定期的なメンテナンス（除菌、消臭、洗浄）が必須となります。

Point

- 各デンタルユニットに毎日1～2回「バイオクリーン」を吸引させて、バキュームホース、ユニット内の分離器等、排水管、スピットン洗浄除菌することで、メンテナンスを行えます。
- 週1回「MD555フロークリーナー」を吸引させて、ユニットと配管内に固着した汚れとパウダージェット粒子を除去します。

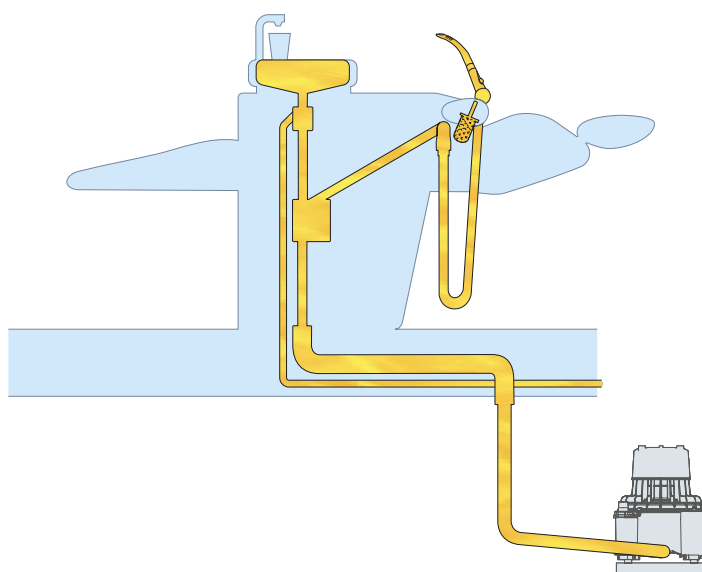



BIOCLEAN® disinfection of suction system

バイオクリーン | 吸引システムの洗浄除菌



デンタルユニットの吸引システムやスピットンの排水管及び分離器の除菌、脱臭、洗浄とメンテナンスが同時にできます。無発泡性でアルデヒド、フェノール、塩素は非含有の洗浄除菌剤です。
有効成分：第四級アンモニウム化合物



- タンパク質、血液、バイオフィーム除去に優れた洗浄力を発揮。
- 除菌効果が高く、作用が長く続きます。菌に耐性を持たせない成分構成。
- アルデヒド、フェノール、塩素非含有で、材質と環境にやさしい洗浄除菌液です。
- ご使用の際は、専用容器「オロカップ」で希釈液を作ります（ユニット1台に対して水1Lにキャップ1杯）。ユニットのホースを「オロカップ」に差し込んで吸引させます。
- スピットンボウルとシンク等の排水の除菌・消臭にもご使用になれます。
- 無発泡性で、セパレーター付きのユニットにも対応可能。

各デンタルユニットに毎日1～2回のご使用をお勧めします。毎日のお手入れには「バイオクリーン」、さらに週1回「MD555フロークリーナー」のご使用をお勧めします。

①希釈液を作製します

▶ ユニット

1台分：キャップ1杯+水1ℓ
2台分：キャップ2杯+水2ℓ

②吸引します

▶ ユニット1台目
立てた状態

▶ ユニット2台目・寝かせた状態

③スピットンの除菌

▶ 約250ml

バイオクリーン 容量1L濃縮液（商品コード：471333） 標準価格5,000円（税別）
 バイオクリーン 容量1L濃縮液6本入セット（商品コード：435675） 標準価格27,000円（税別）

OroCup care system

オロカップ | 活用容器



吸引システム、排水管、分離器の洗浄除菌ケアに使用する容器です。この容器に「バイオクリーン」と「MD555フロークリーナー」の希釈液を作り、吸引させます。

- 一度にユニット2台分にあたる2Lの希釈液を作製できます。1台目のユニットには容器を立てた状態で1Lを吸引させ、2台目は容器を寝かせた状態で残りの1Lを吸引させることができます。
- 容器で希釈液を作り、蓋の部分にバキュームホースやエジェクターを差し込んで、洗浄除菌液を吸引させます。差し込み口は、各社のバキュームホースに対応するアダプタをご用意しております。
- 洗浄液と空気を混ぜて吸引させることで洗浄除菌効果を高めます。

オロカップ活用容器（商品コード：437007） 標準価格6,000円（税別）

MD555 cleaner special cleaner for suction system
フロークリーナー | 吸引システム強力洗浄



配管内
 徹底洗浄



週1回「MD555フロークリーナー」のご使用で配管内徹底洗浄をお勧めします。活用容器「オロカップ」で希釈液を吸引させます。

吸引システム、排水管及び分離器の内部を徹底洗浄します。

有効成分：有機酸、界面活性剤

- ユニットと配管内の汚れの固着を解消し、徹底洗浄するスペシャルクリーナーです。定期的にご使用いただくことで配管の詰まりを防ぎますので、歯面清掃用パウダージェットをご使用の医院には特にお勧めです。
- 優れた洗浄力で固着した汚れや配管内の沈泥も落とします。無発泡性でセパレーター分離器付きのユニットに対応しています。

MD555フロークリーナー 容量2.5L濃縮液（商品コード：437021）……………標準価格8,000円（税別）

MD550 spittoon bowl cleaner
スピットクリーナー



いつも
 清潔



スピットボウルを洗浄するクリーナー

有効成分：アルコール、界面活性剤、有機酸

- 血液、水垢、歯垢染色剤、印象材などの付着物を取り除き、雑菌の増殖を抑えます。
- 洗浄、消臭、メンテナンスが同時にできます。
- 研磨剤を使用していないのでスピットボウル内に傷や磨き跡が残りません。

MD550スピットクリーナー 容量750mL（商品コード：392238）……………標準価格3,200円（税別）



吸引システムの洗浄除菌
 Bioclean MD550 MD555