



MD550 スピットンクリーナー

Spittoon bowl cleaner



原液使用
750 ml

MD550 スピットンクリーナー

原液
使用

スピットンボウルを洗浄する専用クリーナーです。水垢、血液、歯垢染色剤や印象材などを除去し、雑菌の増殖を抑えます。

【使用方法】 ●原液をスピットンボウルに回し入れて、スポンジやブラシで全体に塗布してから約2～3分放置して水で流します。●一日の診療時間終了後には、まずスピットンボウルの洗浄を行ってから吸引システムや排水管を洗浄除菌してください。●アルコールに弱い材質には使用しないでください。●スピットンボウル以外の部分に付着した場合は必ずすぐにふき取ってください。

【取扱注意】 ●使用前にラベルをよく読むこと。●熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。●保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。●他の洗浄液や石鹼と混ぜないこと。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●容器はすすいで処分すること。内容物/容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。

警告

成分：エタノール CAS番号 64-17-5
フロバン-2-オール CAS番号 67-63-0



引火性液体
及び蒸気



強い眼刺激

[www.duerr.co.jp/
md550](http://www.duerr.co.jp/md550)

デュール デンタル
DÜRR DENTAL (ドイツ)
produced by orochemie GmbH & Co KG



E.550.04.05.09-2023.02