

# DÜRR DENTAL | VistaScan Mini View 2.0

## パソコンを使用して画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル 1/2

詳細は取扱説明書をご覧ください

**1** **ポイント!**  
IP水色の感光面を保護  
カバーの黒い面側に

デュールデンタルの純正IPと  
保護カバーを使用してください。

IPを保護カバーに入れ、封をする

**2** **撮影前**

デュールデンタルの  
「FD350除菌ワイブ」  
を使用してください。

撮影前:保護カバー全体の消毒

**3** **ポイント!**  
感光面(水色)をチューブ側に

IPの設置とX線照射

**4** **撮影後**

デュールデンタルの  
「FD350除菌ワイブ」  
を使用してください。

撮影後:保護カバー全体の消毒と乾燥

**5** **読み取りするIPのサイズに合っ  
たプレートガイドを装着**

交換:①のくぼみを押し込むと、プレ  
ートガイドが②の方向に起き上がる

**6**

「カルテ」を選択し、カルテを開く

**7**

デンタル読取開始

**8** **ポイント!**  
保護カバーは消毒と乾燥して  
まっすぐ・綺麗に開封

開封前にIPを少し寄せ、干渉しない位置で  
切るようにします。  
※まっすぐではない場  
合はIPを少し切り口か  
ら出し、挿入時にカバ  
ーが引き込まれないよ  
うに注意してください。

保護カバーを開封

**9** **ポイント!**  
保護カバーを中央に添わせて  
真っすぐ縦に

挿入口の中央に垂直に当て

**10** **ポイント!**指1本で上部中央  
を押す — 保護カバーは残る  
(指2本で差し込まない!)

引き込まれるまで指で押します

**11** **ポイント!**スキャン作業が終  
ったら、「撮影・読取完了」ボタ  
ンをクリック

ダイアログで読取り状態確認

**12**

画像の向き、明るさなどを調整 画像は自動で保存

**13**

空の保護カバーを取ります

**14**

搬出口からIPを取ります

# DÜRR DENTAL | VistaScan Mini View 2.0

## 機器本体のタッチスクリーンから画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル 2/2

詳細は取扱説明書をご覧ください

**1** **ポイント!**  
IP水色の感光面を保護  
カバーの黒い面側に

デュールデンタルの純正IPと  
保護カバーを使用してください。

IPを保護カバーに入れ、封をする

**2** 撮影前  
デュールデンタルの  
「FD350除菌ワイブ」  
を使用してください。

撮影前:保護カバー全体の消毒

**3** **ポイント!**  
感光面(水色)をチューブ側に

IPの設置とX線照射

**4** 撮影後  
デュールデンタルの  
「FD350除菌ワイブ」  
を使用してください。

撮影後:保護カバー全体の消毒と乾燥

**5** 読み取りするIPのサイズに合っ  
たプレートガイドを装着

交換:①のくぼみを押し込むと、プレ  
ートガイドが②の方向に起き上がる

**6**

「読み取り」を選択し、「開始」をクリック  
カルテ入力時は入力して「次へ」

**7**

バー表示が緑色で「挿入可能」を確認

IP挿入準備完了の画面、排出口のランプは緑色点灯

**8** **ポイント!**  
保護カバーは消毒と乾燥して  
まっすぐ・綺麗に開封

開封前にIPを少し寄せ、干渉しない位置で  
切るようにします。  
※まっすぐではない場  
合はIPを少し切り口か  
ら出し、挿入時にカバ  
ーが引き込まれないよ  
うに注意してください。

保護カバーを開封

**9** **ポイント!**  
保護カバーを中央に添わせて  
真っすぐ縦に

挿入口の中央に垂直に当て

**10** **ポイント!**指1本で上部中央  
を押す — 保護カバーは残る  
(指2本で差し込まない!)

引き込まれるまで指で押します

**11**

左下ボタンで向き、明度を調整、画像を保存

**12**

空の保護カバーを取ります

**13**

搬出口からIPを取ります