


DÜRR DENTAL | VistaScan Mini View

パソコンを使用して画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル 1/2


詳細は取扱説明書をご覧ください

- 1** 注意：デュールデンタルの純正のIP保護カバーを使用してください。

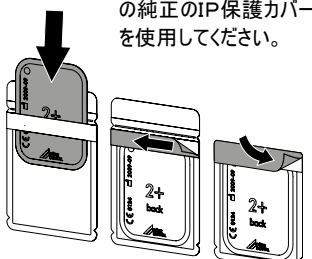


IPを保護カバーに入れ、封をする
- 2** デュールデンタルの「FD350除菌ワイブ」を使用してください。

撮影前

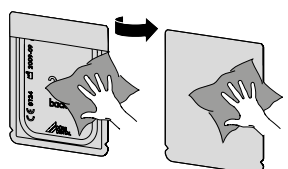


撮影前：保護カバー両面の消毒
- 3**

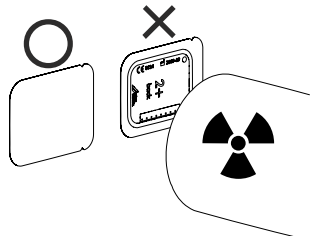


感光面(水色)をチューブ側に
- 4** デュールデンタルの「FD350除菌ワイブ」を使用してください。

撮影後

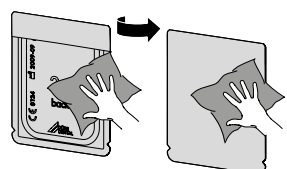


撮影後：保護カバー両面の消毒・乾燥
- 5**




1.カルテの選択
2.レントゲン

「カルテ」を選択 → 「レントゲン」
- 6**




3.種類の選択
4.モードの選択
5.読み取り


撮影種類の選択 → 「モード」の選択 → 「読み取り」ボタンをクリック
- 7** ポイント！
カバーを消毒と乾燥してから

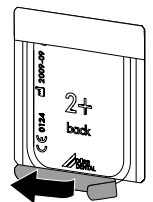


保護カバーを真つすぐ開封
- 8** ポイント！
乾燥した保護カバーを中央の手前に添わせて真つす縦に

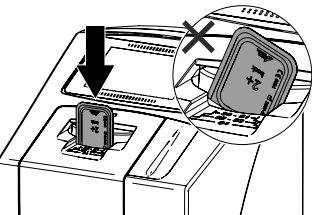


挿入口の中央に垂直に当て
- 9** ポイント！指1本で上部中央を押す — 保護カバーは残る（指2本で差し込まない！）

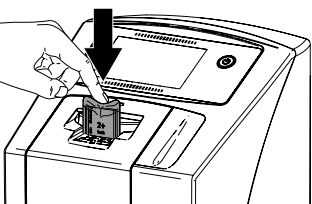

引き込まれるまで指で押します
- 10** ポイント！ スキャン作業が終わったら、「終了」ボタンをクリック




ダイアログで読み取り状態確認
- 11**

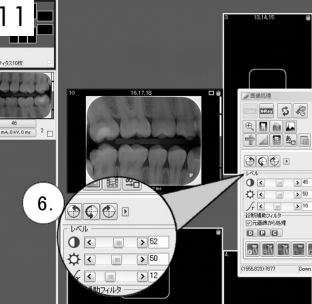


6.

画像の向き、明るさなどを調整
- 12**




8.保存
7.種類の確認

画像種類の選択 → 保存
- 13**

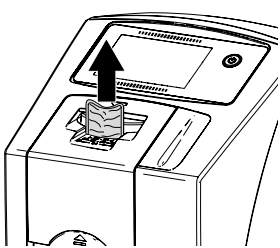

空の保護カバーを取ります
- 14**

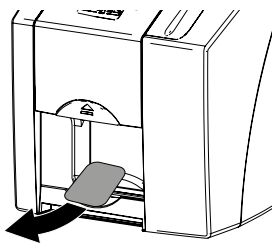

搬出口からIPを取ります




DÜRR DENTAL | VistaScan Mini View

機器本体のタッチスクリーンから画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル 2/2

詳細は取扱説明書をご覧ください


1 注意：デュールデンタルの純正のIP保護カバーを使用してください。

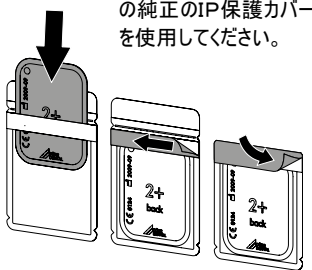

IPを保護カバーに入れ、封をする


2 デュールデンタルの「FD350除菌ワイブ」を使用してください。

撮影前

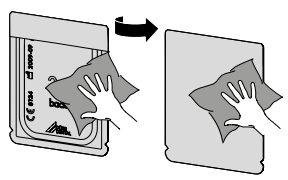

撮影前:保護カバー両面の消毒


3

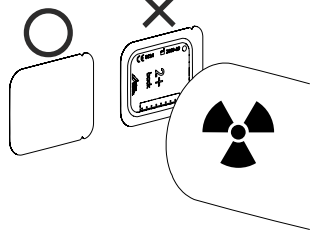

感光面(水色)をチューブ側に


4 デュールデンタルの「FD350除菌ワイブ」を使用してください。

撮影後

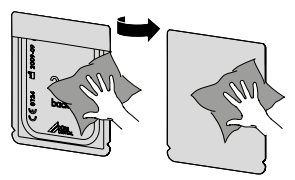


撮影後:保護カバー両面の消毒・乾燥

5




「読み取り」又は「高速読取」を選択します

6




少なくともカルテ番号を記入します

7




IP挿入準備完了の画面

8 **ポイント!**
カバーを消毒・乾燥してから

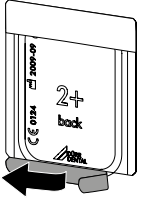


保護カバーを真っすぐ開封

9 **ポイント!**
乾燥した保護カバーを中央の手前に添わせて真っすぐ縦に

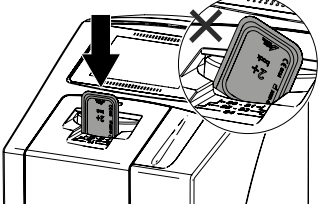

挿入口の中央に垂直に当て


10 **ポイント!** 指1本で上部中央を押す — 保護カバーは残る (指2本で差し込まない!)

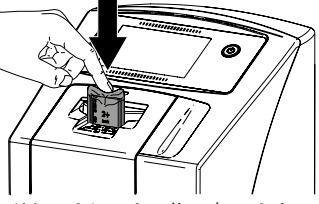

引き込まれるまで指で押します


! スライダーに挟まれたら、10秒以内に指でIPだけを押して中に挿入してください。間違った向きで挿入口に挟まってしまった場合は、再び挿入口のスライダーが開くまで待ち、IPを挿入口に正しい向きで挿入してください。誤って保護カバーまで一緒に差し込むと、スライダーが開かなくなります。IPが搬出口に出てくるのを待って、保護カバーを上へ引き出してください!

11

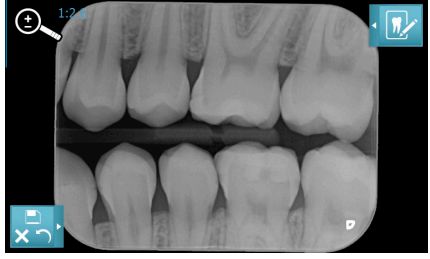


左下ボタンで向き、明度を調整、画像を保存

12

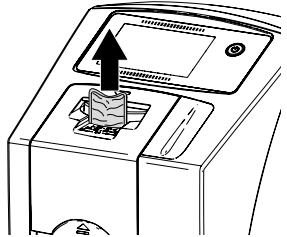

空の保護カバーを取ります

13

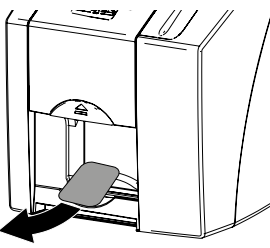

搬出口からIPを取ります