

画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル

詳細は取扱説明書をご覧ください

<p>1 ポイント! IP水色の感光面を保護カバーの黒い面側に</p>  <p>デュールデンタルの純正IPと保護カバーを使用してください。</p> <p>IPを保護カバーに入れ、封をする</p>	<p>2 撮影前 デュールデンタルの「FD350除菌ワイブ」を使用してください。</p>  <p>撮影前:保護カバー全体の消毒</p>	<p>3 ポイント! 感光面(水色)をチューブ側に</p>  <p>IPの設置とX線照射</p>	<p>4 撮影後 デュールデンタルの「FD350除菌ワイブ」を使用してください。</p>  <p>撮影後:保護カバー全体の消毒と乾燥</p>
<p>5 本体の電源を入れ、読み取りするIPのサイズに合ったプレートガイドを装着</p>  <p>プレートガイドの確認</p>	<p>6 カルテを選択 → 画像挿入開始 → モードを選択 → IP挿入</p>  <p>ご使用になるソフトウェアの取扱説明書を参照してください。</p> <p>パソコンで画像挿入を開始</p>	<p>7 ポイント! バー表示が緑色点灯してから、IPを挿入できます…</p>  <p>本体画面、IPの挿入待ち</p>	<p>8 ポイント! 保護カバーは消毒と乾燥してまっすぐ・綺麗に開封</p>  <p>開封前にIPを少し寄せ、干渉しない位置で切るようにします。 ※まっすぐではない場合はIPを少し切り口から出し、挿入時にカバーが引き込まれないように注意してください。</p> <p>保護カバーを開封</p>
<p>9 ポイント! IPを真っすぐ縦にプレートガイドへセット</p>  <p>挿入口に垂直に当てます</p>	<p>10 ポイント! 指1本で上部中央を押す、保護カバーは残る(指2本で差し込まない!)</p>  <p>引き込まれるまで指で押します</p>	<p>11 IPが挿入され、バー表示がオレンジ色に変わり、読み取った画像が表示されます…</p>  <p>本体画面で読み取り状態を確認</p>	<p>12</p>  <p>パソコンで読み取り状態確認</p>
<p>13 注意! オレンジ色で挿入しない</p> <p>左の挿入口 緑=挿入待ち IP挿入OK 右の挿入口 オレンジ=読込中 IP挿入できません</p>  <p>緑色のバーはIP挿入できます</p>	<p>14</p>  <p>画像の向き、明るさなどを調整</p>	<p>15</p>  <p>画像種類の選択 → 保存</p>	<p>16</p>  <p>搬出口からIPを取ります</p>