

## 目次

1. はじめに.....1	8. カルテ検索.....2
2. インストール.....1	9. 画像を開く.....3
3. サーバーの設定.....1	10.画像表示画面.....3
4. アプリの起動.....1	11.オフラインデータベース...5
5. アプリの設定.....1	12.トラブルシューティング...5
6. ヘルプ.....2	
7. データベースの選択...2	

### 1. はじめに

iPad用アプリ「DUERR DENTAL Imaging(デュール デンタル イメージング)」で、無線LANを使ってDBSWINサーバーから画像を呼び出し、iPadで表示、保存することができます。iPadアプリで表示されるグレー諧調は8ビットなので、診断はDBSWINの画面(16ビット)で行うことをお勧めします。

iPadでこのアプリを使えば、歯科医院における患者さんとのコミュニケーションがより充実します。


DBSWINサーバーから受け取った画像がiPadの方でコピーとして保存されます。このため一度受け取った画像は、サーバーの接続がない医院外でも表示できます。

このアプリを使用するには、サーバーにDBSWIN5.4.0(ビルド10978.2J)以上とデュールデンタル・モバイルコネク트가インストールされていることが必要です。以下の説明に従って正しく設定を行ってください。

「DUERR DENTAL Imaging」アプリのご使用には、DBSWIN登録で「デュールデンタル・モバイルコネク트가(有料)をアクティブ化することが必要です。尚、登録せずにデモ版をご使用になる場合は、画像上に弊社ロゴの透かし文字が入ります。

### 2. インストール

- a) DBSWINサーバーに「デュールデンタル・モバイルコネク트가」をインストール:  
DBSWINのDVDのスタートメニューで「ドライバ&プラグイン」タブから「デュールデンタル・モバイルコネク트가のインストール」をクリックして、インストールを行ってください。

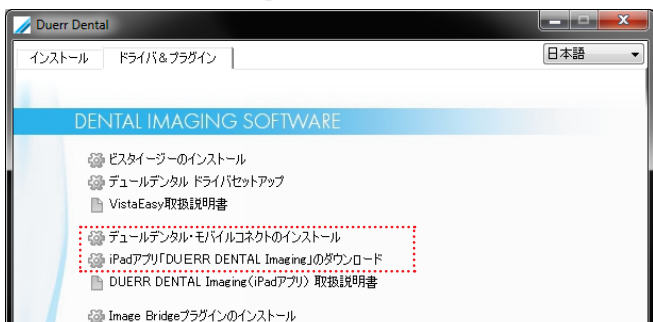

- b) iPadに「DUERR DENTAL Imaging」アプリをインストール: DBSWINのDVDのスタートメニューで「ドライバ&プラグイン」タブから「iPadアプリDUERR DENTAL Imagingのダウンロード」をクリックして、インストールを行ってください。またはiTunesを起動し、App Storeで「Duerr Dental Imaging」を検索してインストールします。

### 3. サーバーの設定

- a) DBSWINサーバーの固定IPアドレスを設定してください。このIPアドレスは後でiPadの設定の際に必要なになります。


IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): 192 . 168 . 1 . 100  
サブネット マスク(U): 255 . 255 . 255 . 0

- b) DBSWINを起動し、設定のユーザー画面でiPadでご利用になるユーザー設定を確認してください。インストールの初期設定ではユーザー「Mobile」、パスワード「0000」となっています。

そうならない場合は、ユーザーを追加してください。「アクセス許可」の項目内の「アドミニストレーター」にチェックを入れ、「アクセス可のデータベース」にご使用のデータベースが入っているかご確認ください。

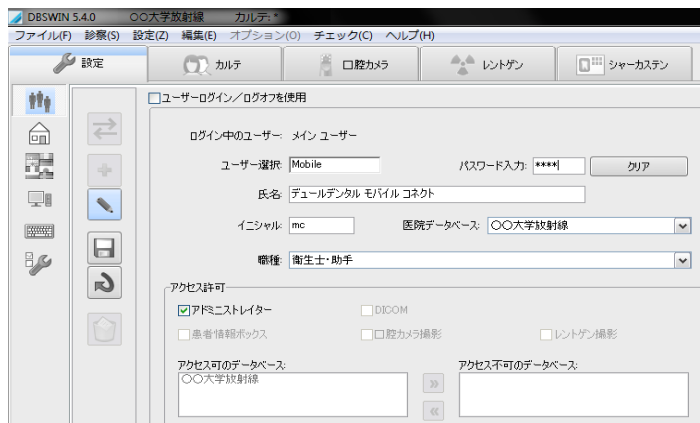

DBSWINのユーザー登録/アクティブ化の画面を開き「デュールデンタル・モバイルコネク트가」をアクティブ化してください。詳細はDBSWIN取扱説明書をご覧ください。アクティブ化するためのキーコードはご購入の代理店よりお受け取りください。

### 4. アプリの起動

アプリをApp Storeからインストール後、iPadのデスクトップに左図のシンボルが表示されますのでタップして起動します。



DBSWINサーバーへの接続設定が未記入の場合、既に入っているデモのデータが使用されます。




### 5. アプリの設定

画面左下のボタンで設定ダイアログを開きます。設定画面は長いので、スクロールして画面下部を表示してください。

#### 5.1 DBSWINサーバーへの接続設定

「デュールデンタルモバイルコネク트가」をDBSWINサーバーにインストールすると、最後に設定パラメータが表示されます。この設定を誤ると接続できませんのでパラメータを確認してから入力してください。

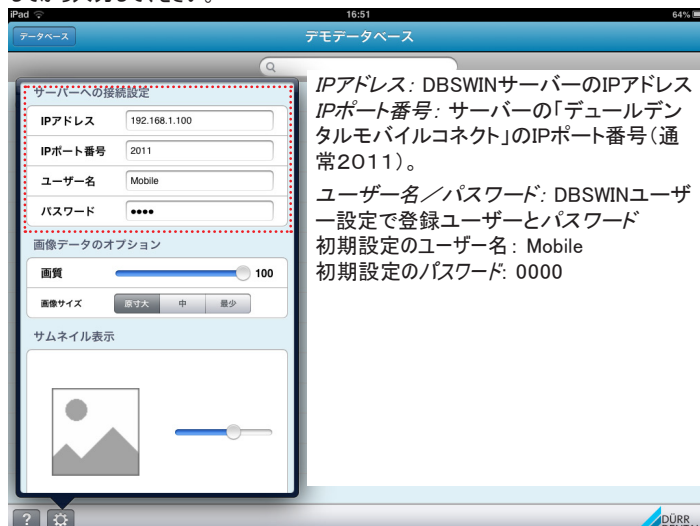


IPアドレス: DBSWINサーバーのIPアドレス  
IPポート番号: サーバーの「デュールデンタルモバイルコネク트가」のIPポート番号(通常2011)。


ユーザー名/パスワード: DBSWINユーザー設定で登録ユーザーとパスワード  
初期設定のユーザー名: Mobile  
初期設定のパスワード: 0000

## 5.2 画質・サムネイルサイズ・クリーンアップの設定


無線で転送するデータ量を画質と画像サイズの設定で減らすことができます。無線LANが遅い場合、多少のスピードアップが図れます。

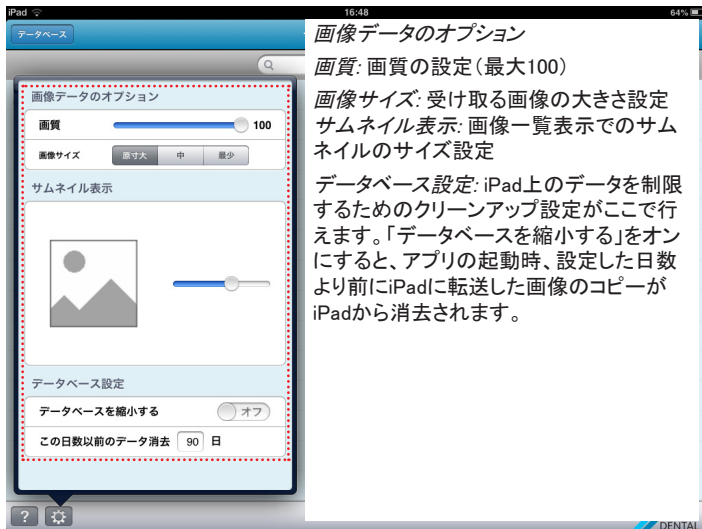

## 5.3 バージョン情報

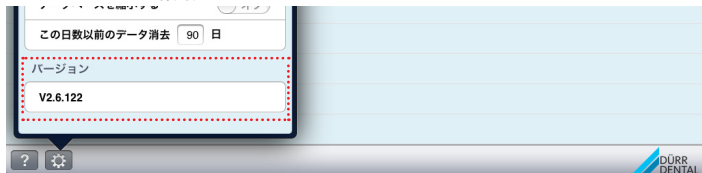

## 5.4 グローバル設定

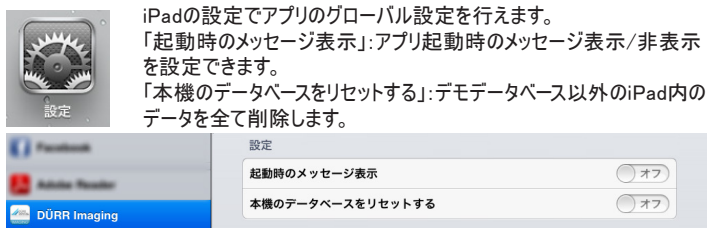


## 6. ヘルプ

画面左下のボタンでヘルプ画面を表示できます。インターネット接続があれば、自動的にヘルプファイルが更新されます。

## 7. データベースの選択

「データベース」のボタンで、データベースの選択画面が表示されます。

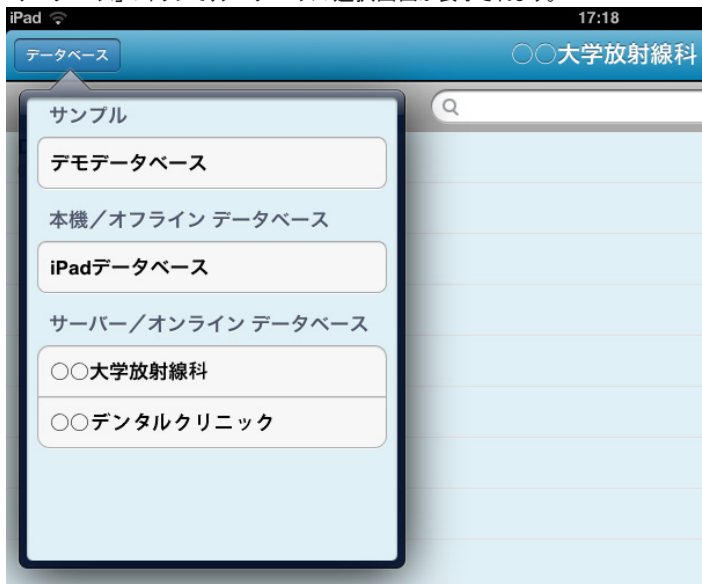

DUERR DENTAL Imagingアプリで、DBSWINサーバーで共有された全データベースにアクセス可能です。

さらにデモデータベース、及びサーバーの接続無しでアクセスできるオフラインデータベースもあります。

現在選択されているデータベースの名前が画面中央上部に表示されます。

### 7.1 サンプル | デモデータベース

このデータベースにはデモ画像の入ったカルテがあります。これは最初からインストールされ、削除することはできません。

### 7.2 本機/オフライン データベース | iPadデータベース

DBSWINサーバーのオンラインデータベースから受信したカルテと画像がiPad内のオフラインデータベースに保存されます。サーバーに接続できない場合でも、このデータは開くことができます。

オンラインデータベースを選択中に、検索リストからカルテ(1つか複数)を選択して、それらと全画像データを受け取ってオフラインデータベースに保存することもできます(この方法は11章に記載しています)。

### 7.3 サーバー/オンラインデータベース

DBSWINサーバーに接続時、サーバーにあるデータベースがリストで表示されます。ご使用のデータベースをタップして選んでください。カルテの検索と画像を開き方は、以下の章でご説明します。iPadでのカルテと画像データはサーバーからのコピーです。そのため、iPad上で画像データを変更してもサーバーのデータに影響はありません。しかしながらサーバーの方で画像を変更、保存するとiPadで該当する画像を開いた時、サーバーから最新の画像が送信されます。

## 8. カルテ検索


画面の上中央、選択したデータベースの名前の下に検索欄があります。ここをタップするとキーボードが表示されます。




キーボードの左下にレイアウトを切り替えるボタンがあります。

アプリを起動後、又はデータベース交換後、カルテの検索/選択リストが表示されます。リストには最近選択したカルテ又はオフラインで保存したカルテが表示されます。検索はカルテ番号、カタカナ氏名又は漢字氏名で行えます。番号や氏名などの一部だけを入力しても検索可能です。生年月日は表示されますが、生年月日での検索はできません。


### カルテ番号の検索例

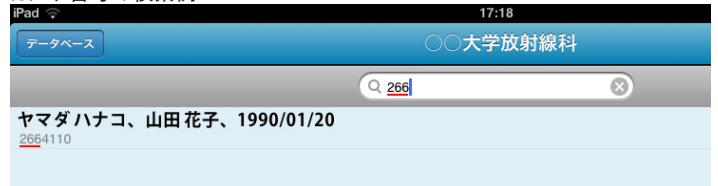

### カタカナ氏名の検索例

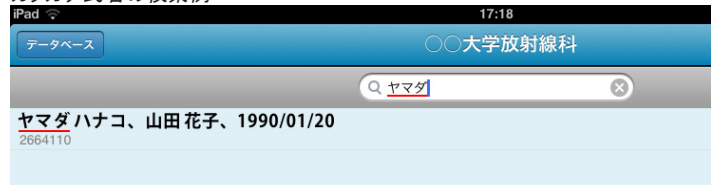

### 漢字氏名の検索例

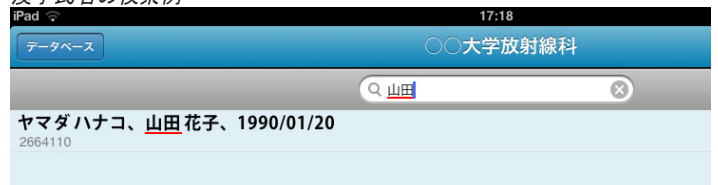

検索語に該当するカルテをリストに表示します。目的のカルテをタップすると画像一覧に切り替わります。

## 9. 画像を開く

「全画像」で、選択したカルテの全ての画像をサムネイルとして表示します。最新の画像を上に表示します。画像が多い場合は画面をスクロールしてください。サムネイルのサイズは設定で変更できます。サムネイルの下に画像撮影の日付(インポートした画像の場合はインポートした日付)と歯番又は撮影種類が表示されます。サムネイルをタップすると画像が全画面で表示されます。



画像グループは、左側のリストにグループ名で表示されます。グループを選択するとそこに属する画像がサムネイルで表示されます。

サムネイルをタップすると画像が全画面で表示されます。



グループ名の下にある「グループ」を選択すると、レイアウト形式で表示されます。サムネイルをタップすると画像が全画面で表示されます。二本の指で画像グループ全体で拡大することもできます(ピンチイン・アウト)。



## 10. 画像表示画面

選択した画像を画像表示画面で大きく表示します。この画面上で可能な作業を以下にご説明します。

### ズーム機能・拡大縮小表示

拡大率の変更は、「ピンチイン・アウト」で行えます。二本の指の間隔を広げると拡大、縮めると縮小します。

ダブルタップで拡大又は全画像表示の切り替えができます。



### 濃淡調整/明るさ・コントラスト

濃淡調整ボタンをタップすると、画面が明るさ・コントラストの調整モードに変わります。この画面上で指を左右に移動すると明るさを調整、上下に移動するとコントラスト、斜めで両方を調整できます。

調整が完了したら右上の「完了」をタップすると変更が保存され、元の画面に戻ります。左上の「キャンセル」をタップすると変更を保存せずに元の画面に戻ります。



### 濃淡の変更を元に戻す

濃淡調整のモードで変更した明るさとコントラストの設定をこのボタンで元画像に戻します。



### 線画機能

この機能で画像上に指で様々な線を描くことができます。右上の「完了」をタップすると線画が保存され、元の画面に戻ります。左上の「キャンセル」をタップすると線画を保存せずに元の画面に戻ります。




一連の作業で描かれた線画はグループとなり、四角い枠で囲まれます。再び線画モードで線を描くと、別の枠で囲まれます。

今描いた線を削除したい場合は「キャンセル」をタップしてください。

それより前に描き、一度保存した線画を削除するには枠内をタップして表示される「削除」をタップしてください。

いくつもの線画グループが重なっている場合、「削除」で古い方から削除されます。

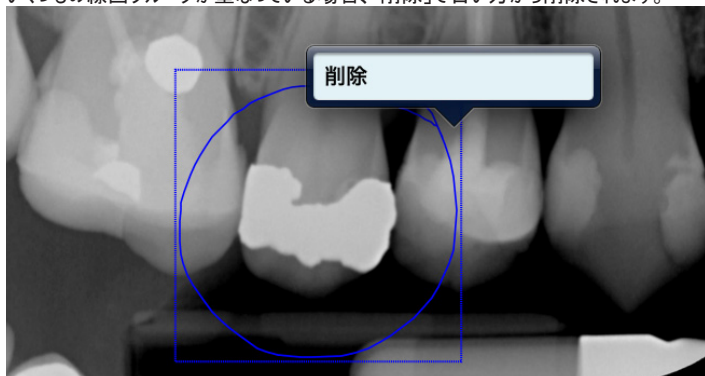


### 線画表示・非表示

このボタンで線画を表示したり、非表示にしたりできます。



### 線の色と太さ

「注釈」のダイアログで線の色と太さを選択できます。選択し終わったら、ダイアログの外側をタップするとダイアログが閉じます。

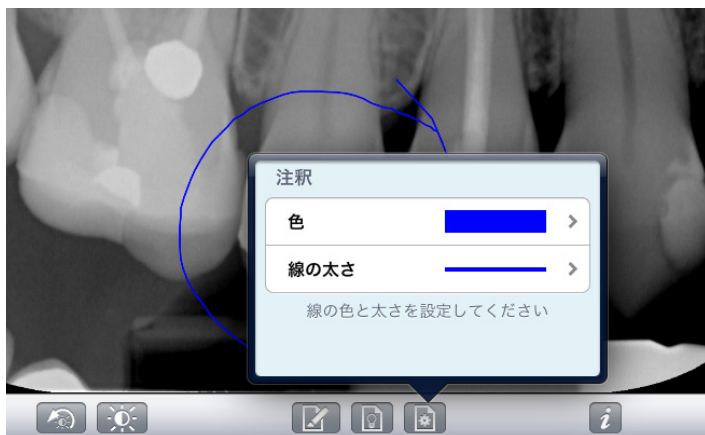

### 画像情報

撮影パラメータ、撮影日時などの情報はこのダイアログで表示されます。右上の「完了」ボタンでダイアログを閉じます。



## 11. オフラインデータベース

DBSWINサーバーから受信した画像とカルテがiPadのオフラインデータベースに保存されます。通常、カルテを選択して画像を開くとデータがオフラインデータベースに保存されます。必要に応じてカルテと画像データを以下の手順でiPadのオフラインデータベースにコピー又は削除することができます。

### 11.1 カルテと画像データをオフラインデータベースにコピー

**編集** 「データベース」メニューの「サーバー／オンライン データベース」でデータベースを選択してください。それから目的のカルテを検索してください。目的のカルテがリストに表示されたら、右上の「編集」ボタンをタップすると、コピーしたいカルテを選択できます。リストを全て表示したい場合はキーボードを閉じたり、画面をスクロールして下さい。



目的のカルテをリストで選ぶと氏名の左側にチェックマークが付きます。




**ダウンロード** カルテと画像を通信  
このボタンで選択したカルテとそこに属する全画像をiPadのオフラインデータベースにコピーすることができます。この作業には無線LANの速度又はデータ容量に応じて数分間かかることがあります。  
通信を中止するには右上の「キャンセル」ボタンをタップします。

### 11.2 オフラインデータベースの整理

**編集** 「データベース」メニューで「本機／オフラインデータベース」の「iPadデータベース」を選択してください。オフラインデータベースのカルテがリストで表示されます。右上の「編集」で整理したいカルテを選択できます。




目的のカルテをリストで選ぶと氏名の左側にチェックマークが付きます。

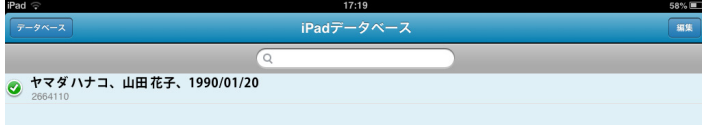

**ゴミ箱** カルテと画像データを削除  
カルテと画像のコピーをiPadから削除します。

**ロック** カルテと画像データの消去保護  
この機能で目的のカルテを自動データベーススクリーンアップの際の削除作業から守ります。

保護されているカルテの右側には、このロックマークが表示されます。

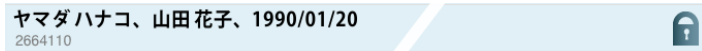

**完了** 画面右上の「完了」のボタンでカルテを選択できるモードから戻ります。

## 12. トラブルシューティング


iPadからサーバーへの接続でトラブルがあった場合は、以下の事を確認してください。

1. サーバーパソコン、LANスイッチと無線ルーターの電源が入っているを確認。
2. サーバーパソコンから無線ルーターまでのLANケーブルの接続確認。
3. iPadから無線LANに接続できるかどうかを確認してください(例えばiPadでインターネットに接続できるかどうか)。
4. 無線ルーターの説明書に沿って、設定を確認(無線ルーターの交換)。

上記確認後、問題が解決しない場合、下記のDBSWINサーバー接続テストを行ってください。

### 12.1 DBSWINサーバーへの接続テスト

iPadからサーバーへの接続が正常かどうかを確認するためにブラウザのアドレス欄にサーバーのIPアドレス>:2011/Practicesを入力し、Enterを押します。  
iPadがサーバーへ接続できる場合は、下記の認証欄が表示されます。  
認証欄にDBSWINで登録したユーザー名とパスワードを入れると、データベースのID番号とデータベース名が以下のようにブラウザで表示されます。これでログインできることが確認できます。

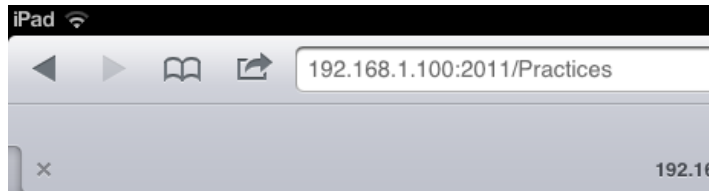

1078916209○○大学放射線



iPadで上記のようにデータベースに接続できない場合は、サーバーでデュールデンタルモバイルコネクットのサービスが起動中か確認してください(以下12.2参照)。

### 12.2 デュールデンタルモバイルコネクットのサービス起動の確認

DBSWINサーバーで「Duerr Dental Mobile Connect」のサービスが起動していないとiPadで接続できません。デュールデンタルモバイルコネクットのサービスが起動中であることを確認するために、Windowsの「サービス」を開き、リスト中で「Duerr Dental Mobile Connect」を探し、状態が「開始」になっているかどうか確認します。このサービスはWindowsで自動的に開始されることが必要です。  
もし、サーバーまたはWindowsの不具合で「Duerr Dental Mobile Connect」のサービスが自動的に開始されない場合は、以下の説明をご覧ください:

[http://www.duerr.co.jp/support-download/docs\\_software/Solution\\_Paper\\_Start\\_DCM\\_J.pdf](http://www.duerr.co.jp/support-download/docs_software/Solution_Paper_Start_DCM_J.pdf)

